


1) DESCRIPCIÓN / USOS

El Sostén Cefálico es un accesorio que se utiliza en conjunto con el arnés (SILLA o NIDO), y tiene la función de sostener la cabeza del paciente cuando no tiene control de la misma. Debido a su diseño, sirve para evitar que la cabeza caiga cuando el paciente se levanta desde acostado, o se vaya hacia delante y los costados cuando está sentado.

2) DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

Nombre de las piezas

- i. Respaldo.
- ii. Vincha.

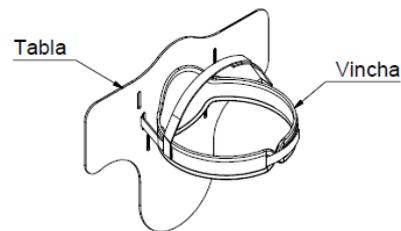

3) INSTRUCCIONES DE USO

Colocación:

- i. Con el paciente acostado y el arnés colocado, pasar el respaldo entre la espalda del paciente y el arnés. Las tiras del arnés deben quedar pasados por arriba del respaldo.
- ii. Ajustar la vincha, en la frente del paciente, y usar la regulación superior para evitar que se baje.
- iii. Levantar accionando el elevador

