

# SOSTÉN CEFÁLICO



**m**  **otus**

Ingeniería en Movilización de Pacientes

## SOSTÉN CEFÁLICO


El SOSTÉN CEFÁLICO es un accesorio que se utiliza en conjunto con el arnés (SILLA o NIDO), y tiene la función de sostener la cabeza del paciente cuando no tiene control de la misma.

### PRINCIPALES USOS DEL KIT

- ◆ Debido a su diseño, sirve para evitar que la cabeza caiga cuando el paciente se levanta desde acostado, o se vaya hacia delante y los costados cuando está sentado.

### DESCRIPCIÓN DEL KIT

- ◆ Respaldo
- ◆ Vincha

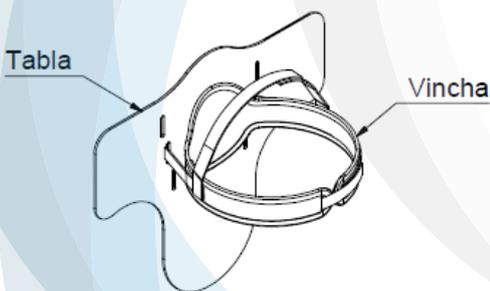

### INSTRUCCIONES DE USO

#### ◆ Colocación:

Con el paciente acostado y el arnés colocado, pasar el respaldo entre la espalda del paciente y el arnés. Las tiras del arnés deben quedar pasados por arriba del respaldo.

Ajustar la vincha, en la frente del paciente, y usar la regulación superior para evitar que se baje.

Levantar accionando el elevador

